



× INTRODUCCIÓN

¿Qué es el pulido por aire?

Aunque la rutina de higiene dental diaria de un paciente es fundamental a la hora de mantener una buena salud bucal, acudir al odontólogo con regularidad es igualmente importante. El “pulido por aire” ya es reconocido internacionalmente como un método excepcional para el mantenimiento de la higiene y salud bucodental.

El “pulido por aire” es una técnica altamente eficaz para eliminar los depósitos que provocan enfermedad periodontal. Lo cierto es que no está exenta de riesgos, razón por la cual no se ha adoptado en todas partes por igual. Para conocer los riesgos asociados a la técnica, consulte la página 5 de este folleto en adelante. Sin embargo, si se realiza correctamente, resulta un método más seguro y eficaz para eliminar los depósitos calcáreos que los tratamientos de mantenimiento habituales.


Conocer en profundidad los efectos, el uso y las precauciones necesarias para realizar el tratamiento de pulido por aire de forma segura le permitirá adentrarse en la nueva era de los tratamientos profilácticos profesionales con una mayor comodidad para usted y sus pacientes.

El arte de usar Perio-Mate

⚠ Lea atentamente el manual del usuario antes de utilizar el aparato.

Antes de usar

Coloque una toalla sobre el rostro del paciente y asegúrese de que el profesional utiliza mascarilla y gafas protectoras antes de poner en funcionamiento el aparato.

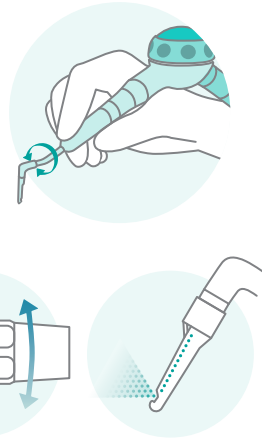

- Irrigue durante el uso.
- Utilice un tubo de aspiración durante el tratamiento.
- No vaporice directamente sobre la mucosa oral ni inserte en la bolsa periodontal sin haber colocado antes la punta de la boquilla.

Subgingival


Utilice con una punta difusora colocada en la boquilla de la pieza de mano Perio-Mate.

Asegúrese de que la punta de la boquilla está bien insertada en su lugar. Se corre el riesgo de aspiración si la punta se desprende durante el tratamiento.


Instrucción

El tratamiento periodontal básico abarca desde los 3 mm a los 6 mm por debajo del final del margen gingival. Eliminación de la placa bacteriana de la bolsa periodontal.

Introduzca suavemente la punta de la boquilla 3 mm o más dentro de la bolsa periodontal en la posición más adecuada para el tratamiento. A continuación, ajuste la profundidad de inserción para adaptarse a las condiciones de las bolsas periodontales del paciente en particular. No introduzca la punta de la boquilla hasta el fondo de la bolsa periodontal para vaporizar a continuación. Se corre el riesgo de provocar embolia.

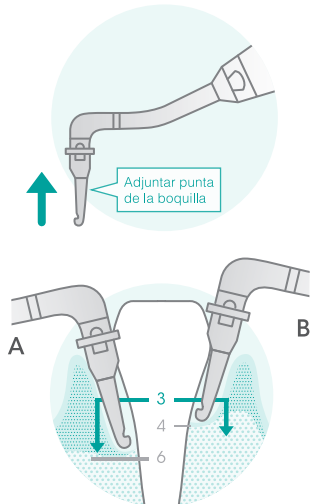



A: si es inferior a 6 mm bolsa periodontal
B: si 4mm bolsa periodontal

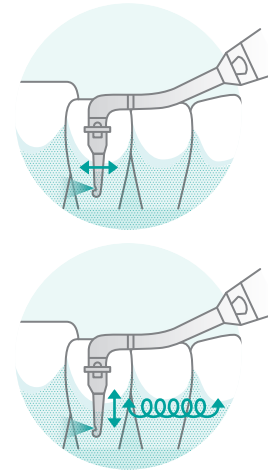

Supragingival



Utilice sin colocar la punta; use solo con la boquilla de la pieza de mano Perio-Mate.

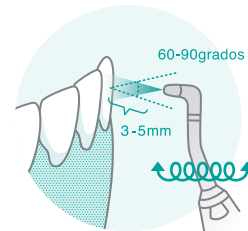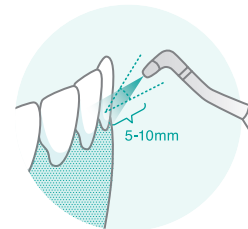

Instrucción

Eliminación de la placa bacteriana del margen gingival (hasta aproximadamente 3 mm dentro de la bolsa periodontal). Para vaporizar, dirija la boquilla hacia el margen gingival a la distancia y con el ángulo indicados en la figura. Manipule con cuidado para asegurarse de que vaporiza sobre toda la superficie del diente.

Eliminación de pequeñas manchas tras quitar depósitos calcáreos extensos.

Para vaporizar, dirija la boquilla hacia la superficie dental a la distancia y con el ángulo indicados en la figura. Mueva la pieza de mano dibujando pequeños círculos.