



## Panel de control

## Ajuste de irrigación

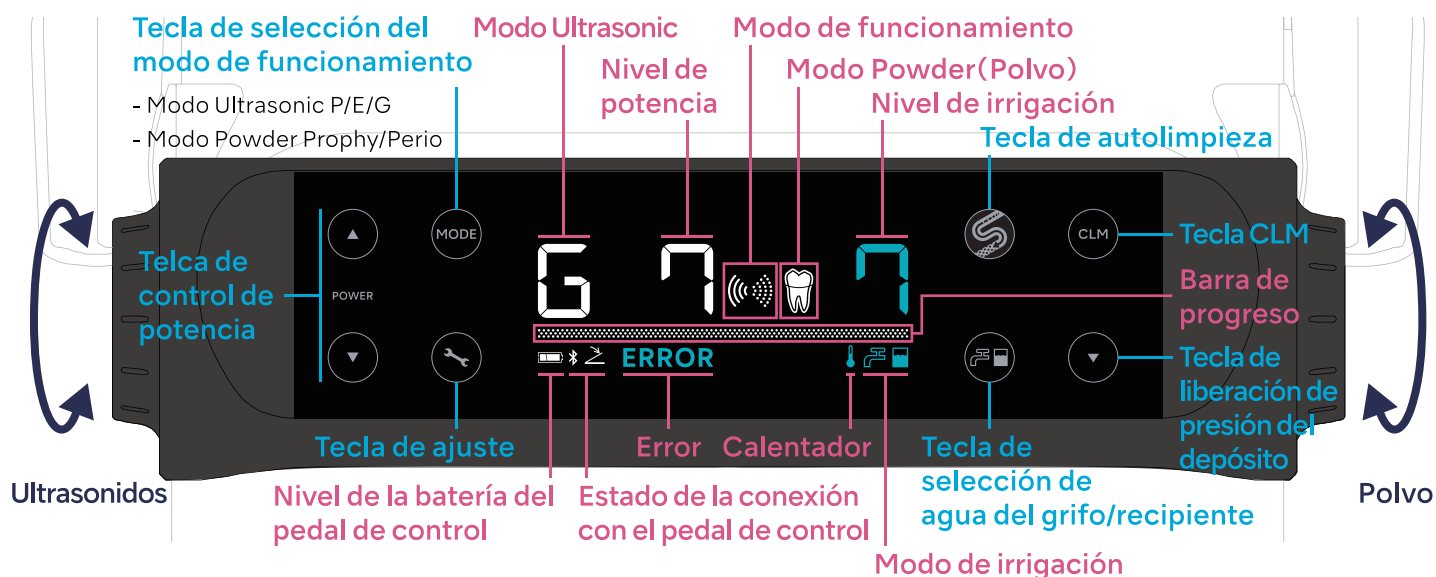


## Pedal de control



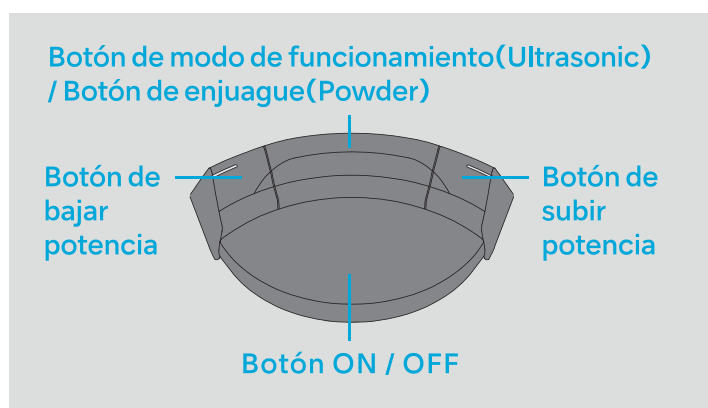


## Utilizar o modo ultrassónico


- ① Sujete la pieza de mano ultrasónica. ② Seleccione el modo Ultrasonic (P/E/G). ③ Ajuste el nivel de potencia. ④ Seleccione el método de irrigación. ⑤ Ajuste del nivel de irrigación. ⑥ Pulse el botón ON / OFF

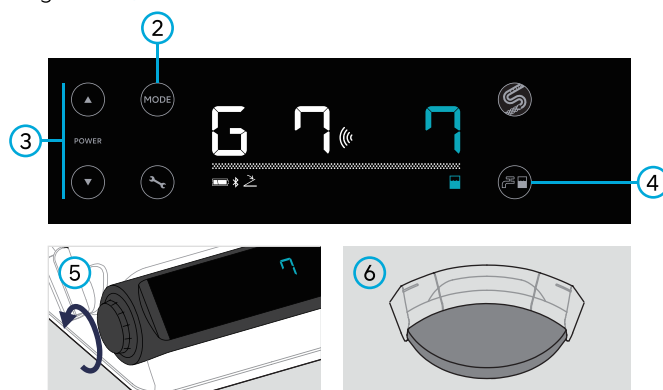

## Uso del modo Powder
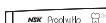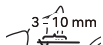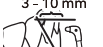
|                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modo                                                                                | Depósito                                                                            | Pieza de mano                                                                       | Boquilla                                                                            | Uso                                                                                 | Polvo                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                     |
|  |  |  |  |  |  |                                                                                     |
|                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                     |
|                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                     |


- ① Sujete pieza de mano de pulido por aire. ② Seleccione el modo Powder (Prophy  / Perio ). ③ Ajuste el nivel de potencia. ④ Ajuste el nivel de irrigación. ⑤ Pulse el botón ON / OFF.

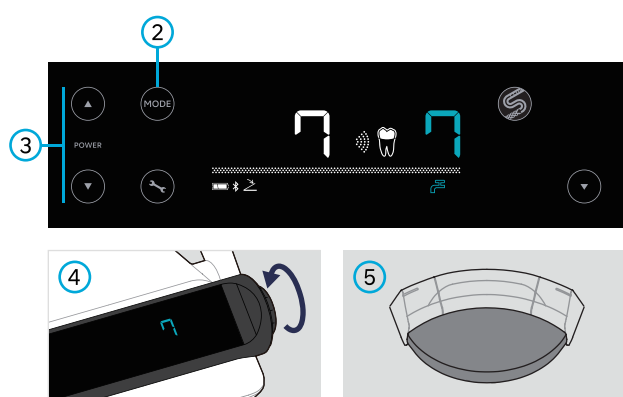

# Autolimpieza

| Modo de autolimpieza debe activarse | Frecuencia de realización de modos de autolimpieza | Uso real de Varios Combi Pro2 |            |                   |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------|
|                                     |                                                    | Ultrasonidos y Polvo          | Polvo solo | Ultrasonidos solo |
|                                     | Después de cada tratamiento                        | W(Powder)                     | W(Powder)  | —                 |
|                                     | Una vez al día (después del tratamiento final)     | D                             | P          | W (Ultrasonidos)  |

W (Ultrasonidos): Eliminación del agua  
W (Polvo): Eliminación del agua y purga de polvo  
P: Eliminación del agua de la manguera de la pieza de mano  
Eliminación del polvo del circuito de polvo  
Descarga de presión del depósito  
D: Eliminación del agua del cable/de la manguera de la pieza de mano  
Eliminación del polvo del circuito de polvo  
Descarga de presión del depósito

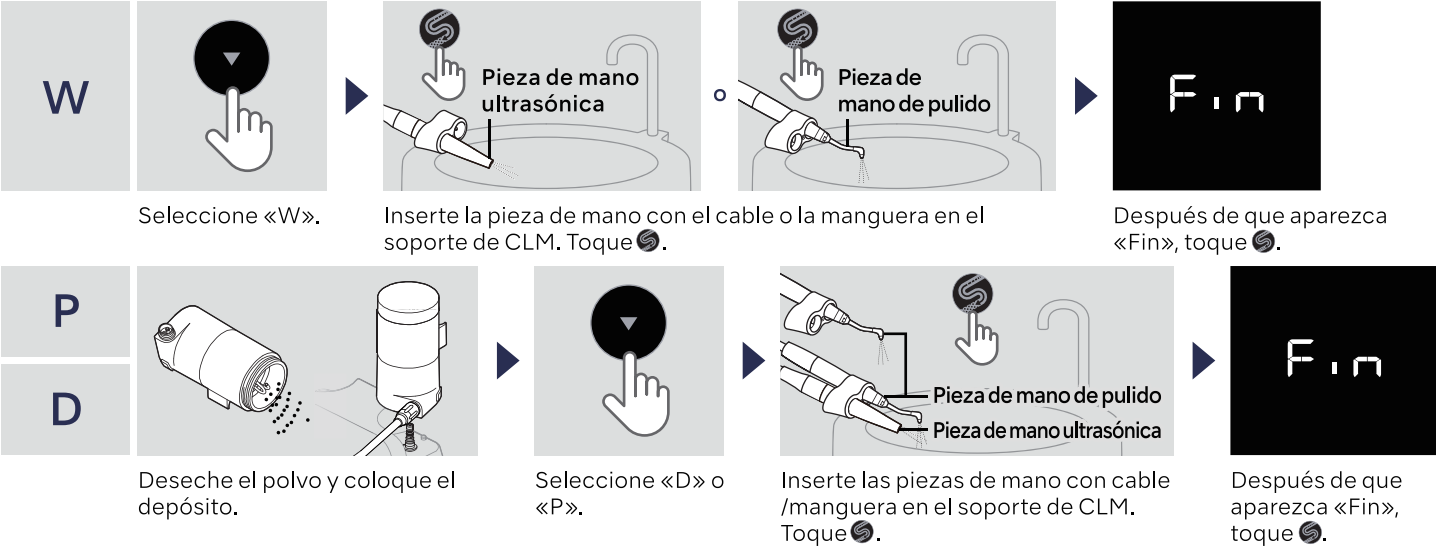

## Descontaminación y prevención de la formación de biopelícula (Modo CLM)

